


EQUIPO:	ASPIRADOR DE SECRECIONES	MARCA:	PULMO-MED
----------------	---------------------------------	---------------	------------------

DESCRIPCIÓN: Diseñado como un dispositivo de aspiración de fluidos, secreciones y otras sustancias en actividades propias del ambiente clinico-hospitalario.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
---------------------------------	------------------------------

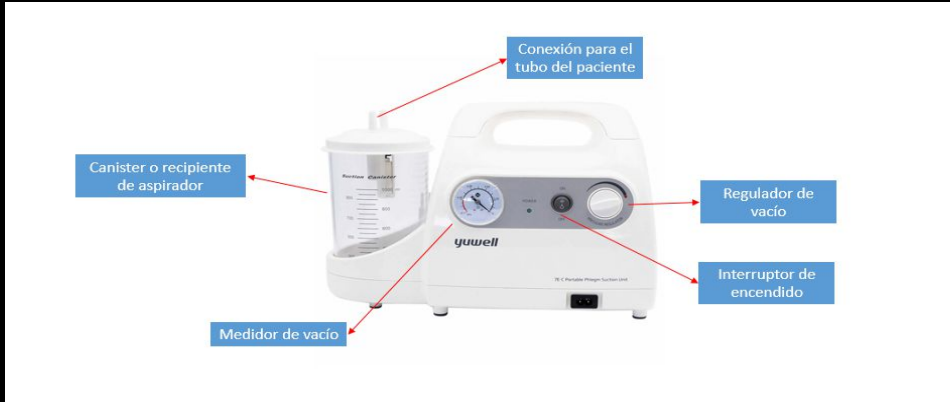

GUÍA DE MANEJO	
----------------	--

1	Coloque el Aspirador sobre una mesa, el piso o cualquier otra superficie horizontal lisa y dura.
2	Asegúrese de que el botón de encendido/apagado (On/Off) esté en la posición "Off".
3	Verifique que el filtro hidrofóbico en línea esté conectado correctamente al puerto de vacío en el equipo. El filtro hidrofóbico en línea evita que el líquido entre en la bomba de vacío.
4	Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "On".
5	Bloquee la conexión hacia el paciente en el cilindro de succión y ajuste la perilla de control de vacío al valor de vacío deseado. Para AUMENTAR el vacío - Gire la perilla HACIA LA DERECHA Para DISMINUIR el vacío - Gire la perilla HACIA LA IZQUIERDA.
	Conecte la primera línea de succión que va desde el filtro del equipo al vaso o canister, tenga en cuenta el rotulado (Vacío o OUT).
6	Conecte la segunda línea de succión que va en la salida del vaso marcada como "Paciente". En el otro extremo de esta línea conecte la sonda de aspiración.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS	
--	--

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	El filtro hidrofobico no puede limpiarse. Si se contamina o tapa, debe reemplazarse

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	
-------------------------	--

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario,
- Desconecte el conjunto del filtro del cilindro de succión y retire este último del aspirador. Deseche el filtro
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	ASPIRADOR DE SECRECIONES	MARCA:	SMAF
---------	--------------------------	--------	------

DESCRIPCIÓN: Diseñado como un dispositivo de aspiración de fluidos, secreciones y otras sustancias en actividades propias del ambiente clinico-hospitalario.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: **IIA (RIESGO MODERADO)**



GUÍA DE MANEJO

1	Coloque el Aspirador sobre una mesa, el piso o cualquier otra superficie horizontal lisa y dura.
2	Asegúrese de que el botón de encendido/apagado (On/Off) esté en la posición "Off".
3	Verifique que el filtro hidrofóbico en línea esté conectado correctamente al puerto de vacío en el equipo. El filtro hidrofóbico en línea evita que el líquido entre en la bomba de vacío.
4	Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "On".
5	Bloquee la conexión hacia el paciente en el cilindro de succión y ajuste la perilla de control de vacío al valor de vacío deseado. Para AUMENTAR el vacío - Gire la perilla HACIA LA DERECHA Para DISMINUIR el vacío - Gire la perilla HACIA LA IZQUIERDA.
6	Conecte la primera línea de succión que va desde el filtro del equipo al vaso o canister, tenga en cuenta el rotulado (Vacío o OUT). Conecte la segunda línea de succión que va en la salida del vaso marcada como "Paciente". En el otro extremo de esta línea conecte la sonda de aspiración.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	El filtro hidrofobico no puede limpiarse. Si se contamina o tapa, debe reemplazarse

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario,
- Desconecte el conjunto del filtro del cilindro de succión y retire este último del aspirador. Deseche el filtro
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	ASPIRADOR DE SECRECIONES 1130-067A	MARCA:	THOMAS
----------------	------------------------------------	---------------	--------

DESCRIPCIÓN: Diseñado como un dispositivo de aspiración de fluidos, secreciones y otras sustancias en actividades propias del ambiente clinico-hospitalario.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: **IIA (RIESGO MODERADO)**



GUÍA DE MANEJO

- | | |
|---|--|
| 1 | Coloque el Aspirador sobre una mesa, el piso o cualquier otra superficie horizontal lisa y dura. |
| 2 | Asegúrese de que el botón de encendido/apagado (On/Off) esté en la posición "Off". |
| 3 | Verifique que el filtro hidrofóbico en línea esté conectado correctamente al puerto de vacío en el equipo. El filtro hidrofóbico en línea evita que el líquido entre en la bomba de vacío. |
| 4 | Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "On". |
| 5 | Bloquee la conexión hacia el paciente en el cilindro de succión y ajuste la perilla de control de vacío al valor de vacío deseado. Para AUMENTAR el vacío - Gire la perilla HACIA LA DERECHA Para DISMINUIR el vacío - Gire la perilla HACIA LA IZQUIERDA. |
| 6 | Conecte la primera línea de succión que va desde el filtro del equipo al vaso o canister, tenga en cuenta el rotulado (Vacío o OUT).
Conecte la segunda línea de succión que va en la salida del vaso marcada como "Paciente". En el otro extremo de esta línea conecte la sonda de aspiración. |

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

- | | |
|---|---|
| 1 | No golpear el equipo. |
| 2 | Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado. |
| 3 | En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica. |
| 4 | Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad. |
| 5 | El filtro hidrofobico no puede limpiarse. Si se contamina o tapa, debe reemplazarse |

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario,
- Desconecte el conjunto del filtro del cilindro de succión y retire este último del aspirador. Deseche el filtro
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.

EQUIPO:	ASPIRADOR DE SECRECIONES 1615	MARCA:	THOMAS
DESCRIPCIÓN: Diseñado como un dispositivo de aspiración de fluidos, secreciones y otras sustancias en actividades propias del ambiente clinico-hospitalario.			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIA (RIESGO MODERADO)	



GUÍA DE MANEJO

1	Coloque el Aspirador sobre una mesa, el piso o cualquier otra superficie horizontal lisa y dura.
2	Asegúrese de que el botón de encendido/apagado (On/Off) esté en la posición "Off".
3	Verifique que el filtro hidrofóbico en línea esté conectado correctamente al puerto de vacío en el equipo. El filtro hidrofóbico en línea evita que el líquido entre en la bomba de vacío.
4	Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición "On".
5	Bloquee la conexión hacia el paciente en el cilindro de succión y ajuste la perilla de control de vacío al valor de vacío deseado. Para AUMENTAR el vacío - Gire la perilla HACIA LA DERECHA Para DISMINUIR el vacío - Gire la perilla HACIA LA IZQUIERDA.
	Conecte la primera línea de succión que va desde el filtro del equipo al vaso o canister, tenga en cuenta el rotulado (Vacío o OUT).
6	Conecte la segunda línea de succión que va en la salida del vaso marcada como "Paciente". En el otro extremo de esta línea conecte la sonda de aspiración.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	El filtro hidrofobico no puede limpiarse. Si se contamina o tapa, debe reemplazarse

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario,
- Desconecte el conjunto del filtro del cilindro de succión y retire este último del aspirador. Deseche el filtro
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.