

EQUIPO:	BOMBA DE INFUSIÓN VP3	MARCA:	MINDRAY
---------	-----------------------	--------	---------

DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para entregar diferentes tipos de medicamentos líquidos y otras soluciones por vías intravenosas o vías subcutáneas con exactitud preestablecida y en cantidades controladas, son usados para múltiples terapias. En estos sistemas de infusión se pueden configurar parámetros como dosis o volumen a infundir, tiempo y velocidad de flujo, también incluyen alarmas audibles y visibles para indicar condiciones anormales o peligrosas.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIB (RIESGO ALTO)
--------------------------	-------------------



GUÍA DE MANEJO

1	Encienda el equipo presionando el botón de encendido (POWER).
2	Verifique que el equipo tenga todos sus accesorios.
3	Hale de la manija de la puerta.
4	Presionando mueva el seguro interno hacia la izquierda para conectar el set de bomba de infusión o (línea de infusión) después de colocar set de bomba de infusión dejar el seguro en su estado original, ajuste la puerta.
5	selección la acción en la pantalla (REGULAR- BOOM A2) oprima OK.
6	Programar los datos de (FLUJO) ok, (VTBI) ok, (TIEMPO) ok.
7	Presione iniciar.
8	Para purgar la bomba oprimes el botón (BOLUS).

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	Es importante que el equipo permanezca conectado continuamente a la toma regulada (color naranja).

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

- Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación, retire los accesorios que estén conectados al equipo.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.