


EQUIPO:	CAMA HOSPITALARIA	MARCA:	LOS PINOS
---------	-------------------	--------	-----------

DESCRIPCIÓN: Equipo esencial para brindar un entorno seguro y adecuado para la atención y tratamiento de pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------

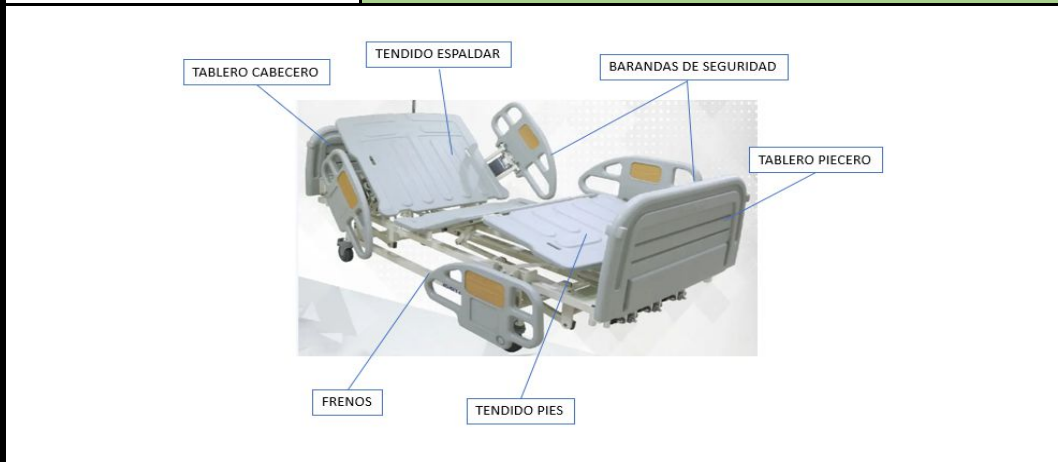

**GUÍA DE MANEJO**

1	Para cambiar la posición de la cama, solicite el cable de poder en el botiquín de la unidad.
2	Presione el botón de encendido en el panel de control, presione los botones de subir o bajar según lo requerido.
3	Al bajar la cama a la altura mínima, verifique que las barandas no toquen el piso.
4	Verifique que la cama este con los frenos activados.
5	Cuando termine de ajustar la posición de la cama, siempre RETIRE EL CABLE DE PODER y entréguelo de nuevo al botiquín.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El peso máximo es 180kg.
5	Se recomienda no dejar caer la baranda en caída libre, el dejar caer libre la baranda puede ocasionar deterioro, y se puede desajustar.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa de los paneles de control.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).


Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo.
- Levante la estructura de la cama para hacer una mejor limpieza
  - Limpie su estructura metálica, colchón, barandas con un paño limpio, suave y húmedo.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.

EQUIPO: CAMA HOSPITALARIA MARCA: MB MUEBLES HOSPITALARIOS

DESCRIPCIÓN: Equipo esencial para brindar un entorno seguro y adecuado para la atención y tratamiento de pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)

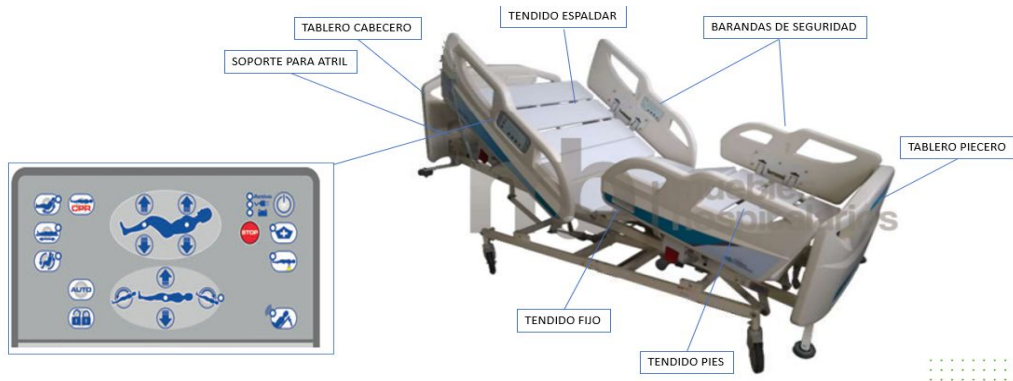

GUÍA DE MANEJO

1	Para cambiar la posición de la cama, solicite el cable de poder en el botiquín de la unidad.
2	Presione el botón de encendido en el panel de control, presione los botones de subir o bajar según lo requerido.
3	Al bajar la cama a la altura mínima, verifique que las barandas no toquen el piso.
4	Verifique que la cama este con los frenos activados.
5	Cuando termine de ajustar la posición de la cama, siempre RETIRE EL CABLE DE PODER y entréguelo de nuevo al botiquín.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	El peso máximo es 180kg.
5	Se recomienda no dejar caer la baranda en caída libre, el dejar caer libre la baranda puede ocasionar deterioro, y se puede desajustar.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa de los paneles de control.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo.
- Levante la estructura de la cama para hacer una mejor limpieza
  - Limpie su estructura metálica, colchón, barandas con un paño limpio, suave y húmedo.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.