



EQUIPO:	CINTA METRICA 201	MARCA:	SECA
---------	-------------------	--------	------

DESCRIPCIÓN: La cinta es utilizada para mediciones corporales en consulta externa y nutrición.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------



GUÍA DE MANEJO

- | | |
|---|---|
| 1 | Extender el flexómetro a la distancia necesaria con precaución |
| 2 | Verifique la funcionalidad del seguro del flexómetro. |
| 3 | presione el botón hasta que cinta quede ajustada al perímetro y tomar la medición |

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

- | | |
|---|---|
| 1 | No golpear el equipo. |
| 2 | Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado. |
| 3 | No sumerja ni vierta líquido sobre el dispositivo |

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Limpie la cinta y la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.