


EQUIPO:	DESFIBRILADOR DEA SAM 350P	MARCA:	HEARTSINE SAMARITAN
---------	----------------------------	--------	---------------------

DESCRIPCIÓN: Este equipo es indicado para el tratamiento inicial de la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular en pacientes inconscientes y sin pulso.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: **IIB (RIESGO ALTO)**

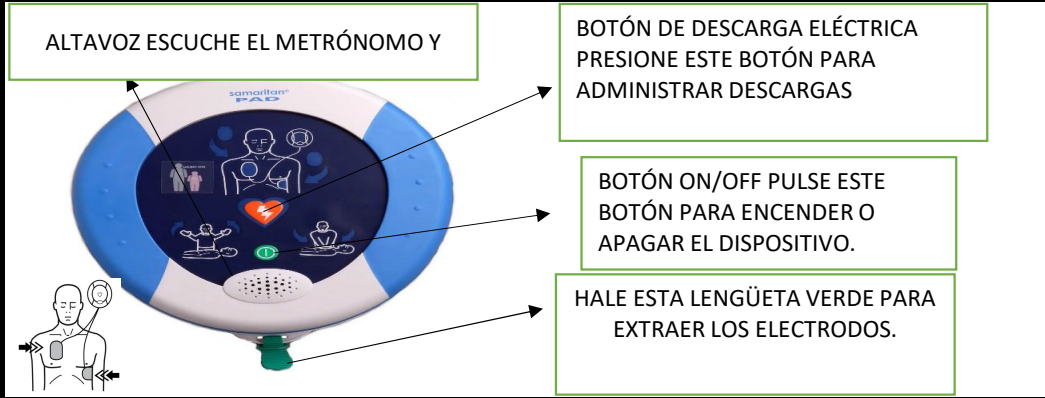

**GUÍA DE MANEJO**

1	Retire la ropa del torso del paciente para exponer la piel, retirando el metal (sostenes, sujetadores o joyería) donde sea posible presione el botón verde para encender el equipo. Siga todas las instrucciones de voz que indique el equipo.
2	Seque el pecho del paciente si está húmedo o pegajoso.
3	Hale la lengüeta verde para sacar la bolsa de electrodos del DEA.
	Abra la bolsa para sacar los electrodos.
4	Coloque los electrodos: Retire el recubrimiento de cada electrodo y aplique cada uno al torso desnudo del paciente
5	para los pacientes adultos coloque un electrodo de forma horizontal en el pecho derecho y el otro de forma vertical en las costillas de la izquierda
	para los pacientes menores de 8 años puede colocar un electrodo en el centro del pecho y otro en el centro de la espalda.
6	Cuando se le indique por instrucción de voz, asegúrese de no tocar al paciente. Para realizar la descarga se debe pulsar el botón naranja.

**RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS**

1	No se debe utilizar en pacientes menores de un 1 año
2	Los electrodos son elementos de un solo uso, la reutilización puede hacer que el dispositivo no administre la terapia correspondiente por lo que puede fallar la resucitación. también puede provocar infección cruzada entre pacientes.
3	Los electrodos deben tener una distancia mínima de separación de 2,5 cm (1 pulgada) y nunca deben entrar en contacto entre sí.

**LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Verifique que el equipo este apagado, si es necesario.
- Limpie su estuche con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.