
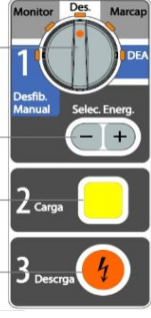
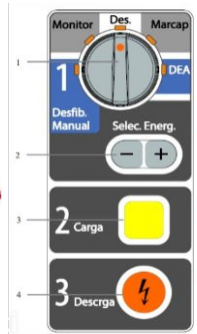
		GUIA DE USO RAPIDO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS FO-TB-21/Versión 3/21-05-2024	
EQUIPO:	DESFIBRILADOR D3	MARCA:	MINDRAY
DESCRIPCIÓN: Desfibrilador bifásico, con funcionalidad de monitorización electrocardiográfica continua y tres tipos de terapias: Desfibrilación manual o automática, cardioversión y marcapasos externo.			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIB (RIESGO ALTO)		
			
1. Mando de selección de modo: Gire este mando para seleccionar el modo de funcionamiento o apague el equipo.			
2. Botón Selector de energía: En el modo Desfib. manual, pulse este botón para seleccionar el nivel de energía.			
3. Botón Carga: Pulse este botón para cargar el desfibrilador.			
4. Botón Descarga: Pulse este botón para administrar una descarga al paciente.			
GUÍA DE MANEJO			
1	Encienda el equipo girando el mando de selección en el sentido de la necesidad, monitor, marcapasos, dea o desfibrilador manual.		
2	DEA se ha de utilizar solo en pacientes con paro cardiaco, sin pulso. Para utilizar este modo gire el mando de selección a DEA, desconecte las palas del lado lateral derecho y conecte el cable de los electrodos, saque los electrodos del carro de paro, conéctelos al cable, rompa el empaque y conecte los electrodos al paciente. Siga todas las instrucciones de voz que proporcionara el equipo.		
3	DESFIBRILACIÓN MANUAL asincrónica es el tratamiento inicial para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular en el paciente sin pulso e inconscientes, la sincrónica está indicada para tratar la fibrilación auricular.		
4	ECG la función de monitorización del ecg se utiliza para monitorizar y/o registrar la onda de ecg y la frecuencia cardiaca.		
5	SPO2 se usa para medir la saturación de oxígeno de la sangre arterial del paciente.		
6	PNI la función se puede usar para la medición no invasiva de la presión arterial del paciente		
7	Palas pediátricas o adultos, para usar las palas pediátricas apriete los seguros de la parte frontal y tire hacia delante.		
RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS			
1	No golpear el equipo.		
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.		
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.		
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.		
5	Es importante que el equipo permanezca conectado continuamente a la toma regulada (color naranja).		
6	No toque al paciente mientras el equipo examina al paciente en modo DEA ni cuando se proporciona una descarga.		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:			
<ul style="list-style-type: none"> -utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante. -No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios. -No permita que el líquido se filtre por la carcasa. -Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona). 			
<ul style="list-style-type: none"> - Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones: -Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación, retire los accesorios que estén conectados al equipo. -Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo. -Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza. - Con un paño seco, Seque el exceso de humedad. 			

EQUIPO:	DESFIBRILADOR D6	MARCA:	MINDRAY
---------	------------------	--------	---------

DESCRIPCIÓN: Desfibrilador bifásico, con funcionalidad de monitorización electrocardiográfica continua y tres tipos de terapias: Desfibrilación manual o automática, cardioversión y marcapasos externo.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIB (RIESGO ALTO)
--------------------------	-------------------



1. Mando de selección de modo: Gire este mando para seleccionar el modo de funcionamiento o apague el equipo.
2. Botón Selector de energía: En el modo Desfib. manual, pulse este botón para seleccionar el nivel de energía.
3. Botón Carga: Pulse este botón para cargar el desfibrilador.
4. Botón Descarga: Pulse este botón para administrar una descarga al paciente.

GUÍA DE MANEJO

1	Encienda el equipo girando el mando de selección en el sentido de la necesidad, monitor, marcapasos, dea o desfibrilador manual.
2	DEA se ha de utilizar solo en pacientes con paro cardiaco, sin pulso. Para utilizar este modo gire el mando de selección a DEA, desconecte las palas del lado lateral derecho y conecte el cable de los electrodos, saque los electrodos del carro de paro, conéctelos al cable, rompa el empaque y conecte los electrodos al paciente. Siga todas las instrucciones de voz que proporcionara el equipo.
3	DESFIBRILACIÓN MANUAL asincrónica es el tratamiento inicial para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular en el paciente sin pulso e inconscientes, la sincrónica está indicada para tratar la fibrilación auricular.
4	ECG la función de monitorización del ecg se utiliza para monitorizar y/o registrar la onda de ecg y la frecuencia cardiaca.
5	SPO2 se usa para medir la saturación de oxigeno de la sangre arterial del paciente.
6	PNI la función se puede usar para la medición no invasiva de la presión arterial del paciente
7	Palas pediátricas o adultos, para usar las palas pediátricas apriete los seguros de la parte frontal y tire hacia delante.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	Es importante que el equipo permanezca conectado continuamente a la toma
6	No toque al paciente mientras el equipo examina al paciente en modo DEA ni cuando se proporciona una descarga.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

- Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación, retire los accesorios que estén conectados al equipo.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.