




EQUIPO:	DOPPLER FETAL	MARCA:	EDAN
---------	---------------	--------	------

DESCRIPCIÓN: Usado para verificar el ritmo cardiaco del feto.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: IIA (RIESGO MODERADO)

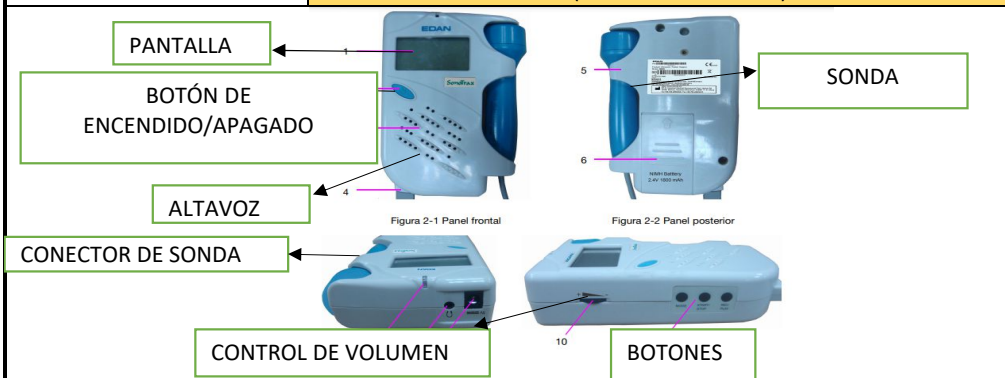

GUÍA DE MANEJO

1	Encienda manteniendo presionada la tecla power.
2	Botón mode (Modo) permite seleccionar el modo de funcionamiento.
3	Botón START/STOP (Iniciar/Detener) : permite iniciar y detener los exámenes
4	Botón REC/PLAY (Grabar/Reproducir) permite iniciar y detener la grabación o la reproducción de los tonos cardíacos fetales.
5	Indicador de control de volumen (-/+ ) permite ajustar el volumen. Gire el botón de volumen hacia (+) para aumentar el volumen y hacia (-) para reducir el volumen.
6	Para retirar la sonda, sostenga la unidad principal con una mano. A continuación, presione ligeramente y tire de la sonda hacia afuera.
7	Utilice el gel para mejorar la calidad de la acústica.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.
5	Si el sistema Doppler no se va a usar durante un período de tiempo prolongado, retire las pilas.

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

- Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación y las baterías de respaldo, los accesorios que estén conectados al equipo.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.