




GUIA DE USO RAPIDO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS FO-TB-21/Versión 3/21-05-2024

EQUIPO: FLUJOMETRO FM-100 MARCA: AIR IMETAN

DESCRIPCIÓN: Equipo indicado para el suministro de oxígeno medicinal a baja presión.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: IIA (RIESGO MODERADO)

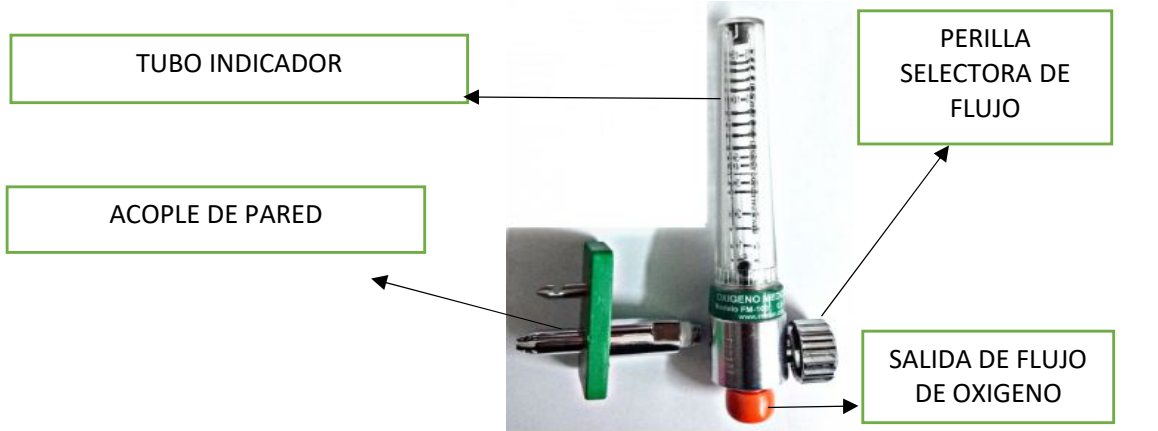

GUÍA DE MANEJO

1	Conecte el flujómetro a la toma de la pared
2	Verifique que el indicador se encuentre en cero cuando se conecte el equipo a la toma.
3	Abra la perilla en el sentido contrario a las manecillas del reloj, suministre acorde a la necesidad del paciente.
4	Cuando termine de suministrar el oxígeno, cierre la perilla en el sentido horario

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	Antes del uso, asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas y que no haya fugas.
2	Este dispositivo no debe ser puesto en funcionamiento en presencia de anestésicos inflamables debido a la posibilidad de explosión causada por la electricidad estática.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:


- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación de oxígeno, Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.



EQUIPO:	FLUJOMETRO - FM197B-15L-CH	MARCA:	GENTEC
---------	----------------------------	--------	--------

DESCRIPCIÓN: Equipo indicado para el suministro de oxígeno medicinal a baja presión.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	IIA (RIESGO MODERADO)
--------------------------	-----------------------

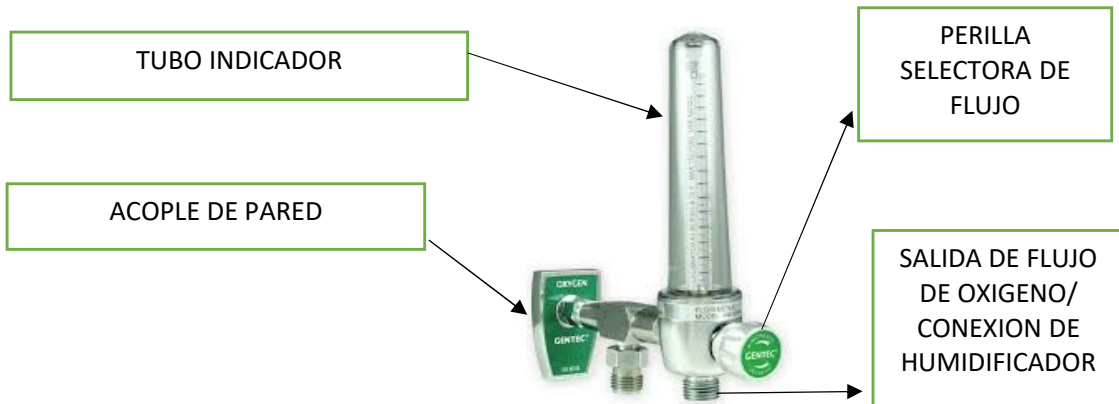

GUÍA DE MANEJO

1	Conecte el flujómetro a la toma de la pared
2	Verifique que el indicador se encuentre en cero cuando se conecte el equipo a la toma.
3	Abra la perilla en el sentido contrario a las manecillas del reloj, suministre acorde a la necesidad del paciente.
4	Cuando termine de suministrar el oxígeno, cierre la perilla en el sentido horario

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	Antes del uso, asegúrese de que todas las conexiones estén bien ajustadas y que no haya fugas.
2	Este dispositivo no debe ser puesto en funcionamiento en presencia de anestésicos inflamables debido a la posibilidad de explosión causada por la electricidad estática.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación de oxígeno, Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.