

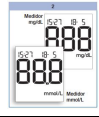

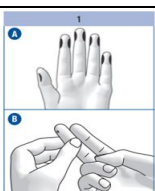
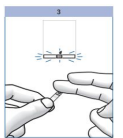

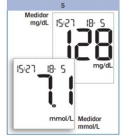
		GUIA DE USO RAPIDO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS		FO-TB-21/Versión 3/21-05-2024
EQUIPO:		GLUCÓMETRO	MARCA:	ACCU-CHEK ACTIVE
DESCRIPCIÓN: Son equipos portátiles, cuya función es la detección cuantitativa de la glucosa sanguínea en pacientes diabéticos o individuos que requieren un monitoreo constante de los niveles de glucosa en sangre.				
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:		IIA (RIESGO MODERADO)		
		<ol style="list-style-type: none"> Pantalla Muestra los resultados de glucemia actuales y guardados así como mensajes del dispositivo Teclas Vea la vista general "Teclas del medidor de glucemia" Tapa Cubre la ventanilla de medición Ventanilla de medición Se encuentra debajo de la tapa Guía para la tira reactiva Aquí se introduce la tira reactiva 		
GUÍA DE MANEJO				
1	Introduzca la tira reactiva en la guía para la tira reactiva en la dirección de las flechas hasta que encaje perceptiblemente. No doble la tira reactiva.			
1	El medidor se enciende y realiza primero una prueba de pantalla estándar (durante aprox. 2 segundos).			
1	Cuando aparezcan el símbolo de la tira reactiva y el símbolo de la gota parpadeando: Extraiga la tira reactiva del medidor.			
1	Pinche con el dispositivo de punción un lado de la yema del dedo. La ilustración (A) muestra los lugares recomendados para obtener sangre. Masajea el dedo en sentido de la yema, ejerciendo un poco de presión para ayudar a que se forme una gota de sangre (vea B).			
1	A continuación los símbolos de la tira reactiva y de la gota parpadean en la pantalla. Ahora dispone de aprox. 20 segundos para aplicar la sangre en la tira reactiva y volver a introducir la tira en el medidor			
1	Introduzca la tira reactiva en la guía para la tira reactiva en la dirección de las flechas hasta que encaje perceptiblemente.			
1	Después de aprox. 8 segundos termina la medición. En la pantalla aparece el resultado de glucemia y se oye una señal acústica.			
RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS				
1	No golpear el equipo.			
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.			
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.			
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.			
5	La lanceta se debe usar una sola vez. Nunca comparta ni reúse la lanceta. Siempre deseche las lancetas correctamente, verificar fecha de vencimiento de lancetas			
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN				
Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones: -utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante. -No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios. -No permita que el líquido se filtre por la carcasa. -Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).				
Para limpiar el equipo, siga estas normas: -Apague el equipo si es necesario, -Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo. -Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza. - Con un paño seco, seque el exceso de humedad.				