



EQUIPO:	GRAMERA SF-400	MARCA:	SCALE
---------	----------------	--------	-------

DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado para determina el peso residuos orgánicos de pacientes.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)



GUÍA DE MANEJO

1	Dejar equipo en una superficie plana a nivel
2	Pulse la tecla ON/OFF para encender la balanza.
3	Seleccione una unidad de peso con la tecla (MODE) si es necesario.
4	Si la pantalla no muestra cero, pulse la tecla (TARE) para que se muestre cero en la pantalla.
5	Cuando coloque el recipiente en la bandeja de pesaje pulse la tecla TARE para que se muestre cero en la pantalla (pantalla de peso neto).
6	Coloque el elemento que se va a pesar en la bandeja o en el recipiente y espere unos segundos para el resultado del peso neto.
7	Retire el elemento de la bandeja de pesaje

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo funciona correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo, póngase en contacto con el área de biomédica.
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la superficie del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza y desinfección
- Con un paño seco. Seque el exceso de humedad.