

EQUIPO: LARINGOSCOPIO MARCA: WELCH ALLYN

DESCRIPCIÓN: Es un dispositivo que se utiliza para examinar y visualizar las vías respiratorias de un paciente y ayuda a colocar un tubo traqueal.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)



GUÍA DE MANEJO

| | |
|---|--|
| 1 | Ensamble el laringoscopio colocando la hoja en el mango. Asegúrese de que esté firmemente sujeto y que la luz funcione correctamente. |
| 2 | Coloque al paciente en una posición adecuada, generalmente en decúbito supino (boca arriba). |
| 3 | Sujete el mango del laringoscopio con tu mano dominante. |
| 4 | Abra la boca del paciente con su mano no dominante y avance la hoja del laringoscopio por el lado derecho de la boca, desplazando la lengua hacia la izquierda. |
| 5 | Avance el laringoscopio hacia la faringe hasta visualizar la epiglotis. |
| 6 | Con movimientos suaves y controlados, levante la hoja del laringoscopio hacia adelante y hacia arriba (en dirección a los pies del paciente) para exponer las cuerdas vocales. |
| 7 | Introduzca el tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales, asegurándote de que pase entre ellas. |
| 8 | Retira el laringoscopio suavemente mientras mantienes el tubo endotraqueal en su lugar. |

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

| | |
|---|--|
| 1 | No golpear el equipo. |
| 2 | Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado. |
| 3 | En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica. |
| 4 | La elección de la hoja del laringoscopio (curva o recta) dependerá de la anatomía del paciente y la preferencia del profesional. |
| 5 | Si encuentra resistencia durante la intubación, no fuerce el tubo. Retire y reintente la intubación para evitar lesiones. |

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

Hojas:

Las hojas son de un uso , deséchelas después de utilizarlas.

Mango:

- Utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para realizar la limpieza y desinfección del equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Use un paño suave o un pañuelo para limpiar el exterior.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.