


EQUIPO:	MARTILLO DE REFLEJOS	MARCA:	GMD
DESCRIPCIÓN: Equipo utilizado para evaluar las estructuras neurológicas de los pacientes.			

CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)
--------------------------	-----------------

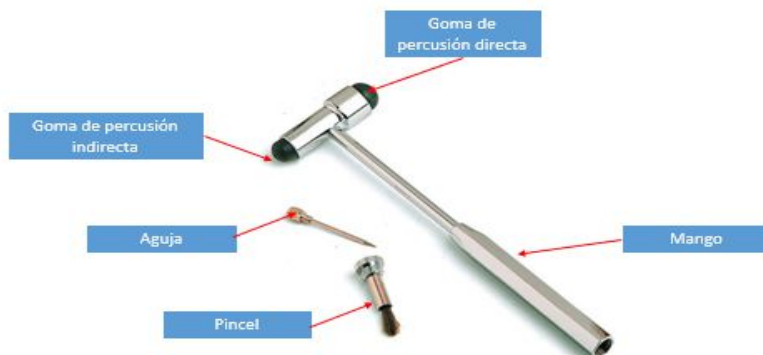

GUÍA DE MANEJO

1	Asegúrese de que el paciente esté cómodo y relajado. Esto puede implicar que se siente, se acueste o adopte otra posición adecuada.
2	Localice el tendón que necesita ser golpeado para el reflejo específico. Por ejemplo, para el reflejo rotuliano, localice el tendón rotuliano justo debajo de la rótula.
3	Visualice y palpe el tendón para asegurarse de que está golpeando el lugar correcto.
4	Golpee suavemente el tendón con un movimiento rápido y controlado del martillo. Asegúrese de que el golpe sea lo suficientemente firme para provocar una respuesta, pero no demasiado fuerte.
5	Observe la contracción del músculo correspondiente. Por ejemplo, en el reflejo rotuliano, busque la extensión de la pierna.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	No golpear el equipo.
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por las gomas, punzón.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Limpie la superficie del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.