



GUIA DE USO RAPIDO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS

FO-TB-21/Versión 3/21-05-2024

EQUIPO: NEGATOSCOPIO MARCA: DOS CUERPOS

DESCRIPCIÓN: Dispositivo utilizado para la observación directa de imágenes médicas impresas en placas radiográficas, el cual consta de una fuente de luz que produce una intensidad de iluminación uniforme y una pantalla donde se colocan las imágenes a observar.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)



GUÍA DE MANEJO

- 1 Ubique la placa radiografica en los clips superiores del negatoscopio.
- 2 Encienda el equipo para activar la fuente de luz y poder observar la radiografia.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

- 1 No golpear el equipo.
- 2 Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
- 3 En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo si es necesario.
- Limpie la pantalla de visualización con un paño limpio, suave y húmedo.
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Seque el exceso de humedad con un paño seco.