




EQUIPO: SELLADORA MARCA: IMPUSLE SEALER

DESCRIPCIÓN: Instrumento utilizado para el cierre de bolsas de medicamentos , por medio del calor.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)

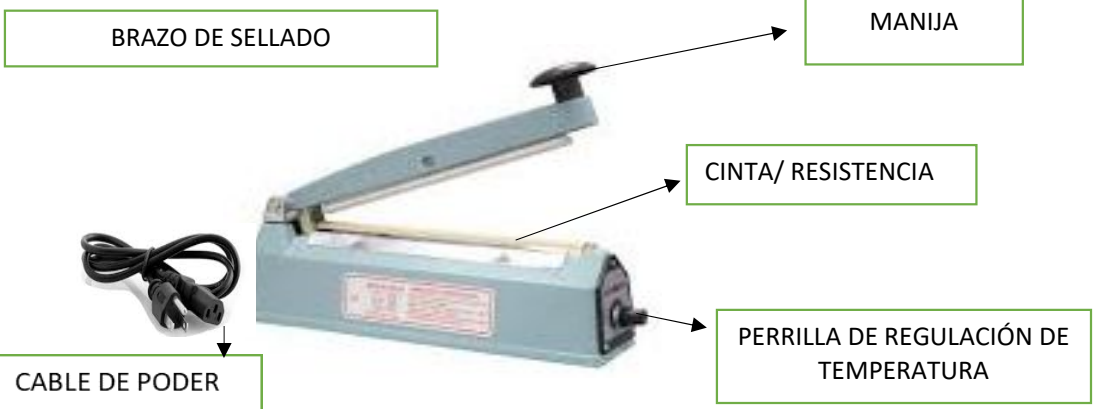

GUÍA DE MANEJO

- 1 Dejar equipo en una superficie plana a nivel.
- 2 Encienda el equipo con la perrilla de regulación de temperatura.
- 3 Verifique que la luz encienda al bajar el brazo de sellado.
- 4 una vez verificado puede comenzar el sellado.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

- 1 Es importante que el equipo permanezca conectado continuamente a la toma corriente para su funcionamiento.
- 2 No golpear el equipo.
- 3 Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
- 4 En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
- 5 Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).


- Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación.
- Limpie la cinta con paño limpio, suave y seco .
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.

EQUIPO: SELLADORA RIVA **MARCA:**

DESCRIPCIÓN: Instrumento utilizado para el cierre de bolsas de medicamentos , por medio del calor.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: I (RIESGO BAJO)

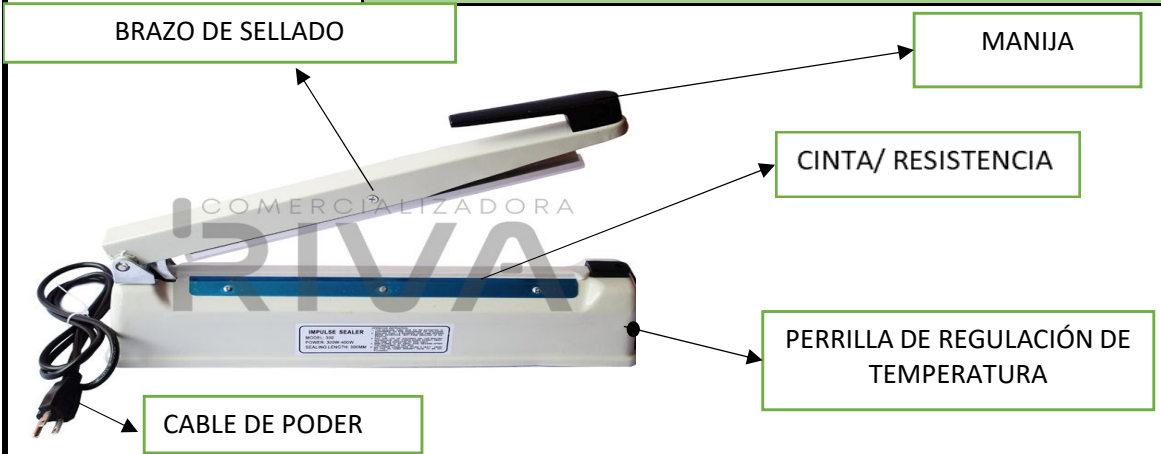

GUÍA DE MANEJO

1	Dejar equipo en una superficie plana a nivel.
2	Encienda el equipo con la perrilla de regulación de temperatura.
3	Verifique que la luz encienda al bajar el brazo de sellado.
4	una vez verificado puede comenzar el sellado.

RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS

1	Es importante que el equipo permanezca conectado continuamente a la toma corriente para su funcionamiento
2	No golpear el equipo.
3	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.
4	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.
5	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:

- utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No sumerja ni vierta líquido sobre el equipo ni en los accesorios.
- No permita que el líquido se filtre por la carcasa.
- Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).

- Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:

- Apague el equipo, desconecte el cable de alimentación.
- Limpie la cinta con paño limpio, suave y seco .
- Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.
- Con un paño seco, Seque el exceso de humedad.