




## GUIA DE USO RAPIDO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS


FO-TB-21/Versión 3/21-05-2024

EQUIPO:	TALLIMETRO	MARCA:	CHARDER
DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir la altura de los pacientes.			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)		
			
GUÍA DE MANEJO			
1	Para utilizar un tallímetro, el paciente debe pararse en posición vertical y sin calzado, con la cabeza en posición neutral y la espalda recta.		
2	El personal debe deslizar la pieza deslizante del tallímetro hacia abajo, presionándola suavemente sobre la parte superior de la cabeza del paciente hasta que quede ajustada a la altura máxima.		
3	Se deben leer las marcas graduadas para obtener la medida precisa de la altura del paciente.		
RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS			
1	No golpear el equipo.		
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.		
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.		
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			
<p>Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante.</li><li>-Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).</li></ul> <p>Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza.</li><li>-Seque el exceso de humedad con un paño seco.</li></ul>			

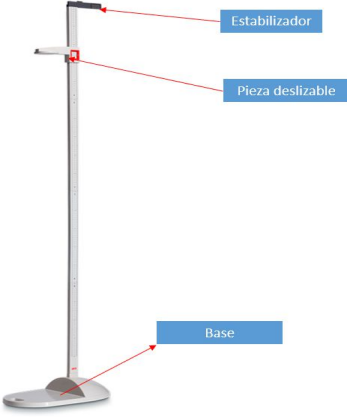

## GUIA DE USO RAPIDO PARA EQUIPOS BIOMEDICOS

FO-TB-21/Versión 3/21-05-2024

EQUIPO:	TALLIMETRO	MARCA:	SECA
DESCRIPCIÓN: Equipo diseñado para medir la altura de los pacientes.			
CLASIFICACIÓN DE RIESGO:	I (RIESGO BAJO)		
			
<b>GUÍA DE MANEJO</b>			
1	Para utilizar un tallímetro, el paciente debe pararse en posición vertical y sin calzado, con la cabeza en posición neutral y la espalda recta.		
2	El personal debe deslizar la pieza deslizante del tallímetro hacia abajo, presionándola suavemente sobre la parte superior de la cabeza del paciente hasta que quede ajustada a la altura máxima.		
3	Se deben leer las marcas graduadas para obtener la medida precisa de la altura del paciente.		
<b>RECOMENDACIONES, PRECAUCIONES Y AVISOS</b>			
1	No golpear el equipo.		
2	Antes de hacer uso, el operador debe comprobar que el equipo y sus accesorios funcionan correctamente y están en buen estado.		
3	En caso de falla, caída o derrame de líquido sobre el equipo o los accesorios, póngase en contacto con el área de biomédica.		
4	Ubique el equipo en un lugar donde pueda usarlo con facilidad.		
<b>LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN</b>			
Mantenga el equipo libre de polvo y suciedad. Para evitar que el equipo sufra daños siga estas instrucciones: -utilice el agente de limpieza y desinfectante siguiendo las instrucciones del fabricante. -Nunca utilice materiales abrasivos ni limpiadores corrosivos (como acetona o limpiadores que lleven acetona).			
Para limpiar el equipo, siga estas instrucciones: -Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave humedecido con el agente de limpieza. -Seque el exceso de humedad con un paño seco.			